

# COMMENT RÉALISER SON **AUTOTEST** NASAL ?

**!** Les autotests sont destinés aux personnes qui n'ont pas de symptômes et qui ne sont pas des personnes contacts. Un formulaire est à remplir avant de procéder à l'autotest.

**1** Se laver les mains, puis sortir les éléments de la boîte.




**2**




Retirer l'opercule du tube contenant la solution réactive et le placer à l'endroit prévu sur la boîte.

**3** Sortir la cassette de son emballage, puis sortir l'écouvillon de son emballage.

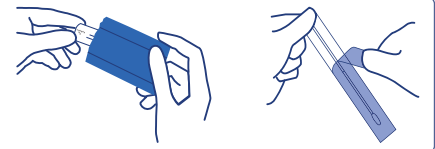


**4**

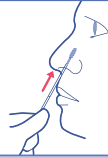

Enfoncer doucement l'écouvillon verticalement sur 2 à 3 cm dans une narine.

**5** Basculer l'écouvillon et l'introduire un peu jusqu'à rencontrer une légère résistance.

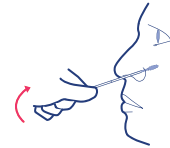

**6**



Réaliser un mouvement de rotation.

**7** Essorer l'écouvillon dans la solution pendant 10 secondes et mettre la tétine compte-gouttes sur le tube.



**8**



Déposer 4 gouttes de la solution dans le puit de la cassette. Patienter 10 à 15 minutes, avant de lire les résultats.

**9**

Si le résultat est **NÉGATIF**, retrouver le médiateur pour enregistrer votre résultat et récupérer votre certificat de test.

Si le résultat est **POSITIF**, s'isoler et effectuer immédiatement un test PCR de confirmation dans un laboratoire médical.

